

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES.

REF. 182/REF.183/REF.192/REF.193



UNE 0065:2020.

Mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso”

UNE-CWA 17553:2020. Nivel 90%

Cobertores faciales comunitarios. Guía de requisitos mínimos, métodos de ensayo y uso.

Informe: AQUIMISA 21_036623

Eficacia de filtración bacteriana (BFE): 93 %

Respirabilidad (ΔP): 10 Pa/cm²

Composición: MONOCAPA 95% POLIÉSTER 5% SPANDEX.

ADVERTENCIA: Esta mascarilla higiénica no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42/CEE o del Reglamento UE 2017/745 (máscaras quirúrgicas) ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE 2016/425 (dispositivos de protección respiratoria)

Mascarilla higiénica de uso personal.

Máximo 25 lavados.

Talla:	INFANTIL (> 7 años)
	M
	G



Fabricante: JOYLU SPORT, S.L.

✉ joylu@joylu.com

☎ (+34) 957 32 45 42

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES.

REF. 182/REF.183/REF.192/REF.193

1. INTRODUCCIÓN




Con este manual se pretende proporcionar al consumidor las instrucciones de uso y mantenimiento de la presente mascarilla higiénica.

El fabricante declina toda responsabilidad en los daños o deterioros causados por modificaciones no autorizadas efectuadas en el equipo por parte del usuario.

Las mascarillas higiénicas no eximen al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales conforme a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

Las medidas de protección colectivas son prioritarias sobre las medidas de protección individual.

A lo largo del texto se utilizará la figura  para indicar la supervisión de un adulto.

2. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO

ADVERTENCIA: Para utilizar esta mascarilla higiénica correctamente, es importante que siga estas instrucciones.

ADVERTENCIA: Si estás enfermo, esta mascarilla higiénica no es adecuada. Busque consejo médico

ADVERTENCIA: Esta mascarilla higiénica no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42/CEE o del Reglamento UE 2017/745 (máscaras quirúrgicas) ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE 2016/425 (dispositivos de protección respiratoria)

ADVERTENCIA: Verifique que la mascarilla siempre se ajusta correctamente y cubre su nariz boca y barbilla. Se recomienda que esta mascarilla higiénica se use sobre la piel desnuda; Las barbas pueden reducir la eficiencia de filtración por debajo de los límites establecidos.

ADVERTENCIA: Esta mascarilla higiénica no reemplaza las medidas de protección (lavado de manos regular, separación física, contacto reducido con otras personas). Minimiza la proyección de las gotas de saliva respiratoria del usuario en el medio ambiente.

ADVERTENCIA: No la use cuando practique una actividad física intensa.

ADVERTENCIA: Las mascarillas higiénicas no son adecuadas para niños menores de 3 años. Se recomienda que los niños entre 3 y 12 años sean supervisados mientras usan la mascarilla higiénica. Una mascarilla que dificulta la capacidad de respiración del usuario mientras la usa por primera vez se considera inadecuada. Puede llevar tiempo sentirse cómodo con la mascarilla higiénica.

ADVERTENCIA: Lave la mascarilla higiénica después de cada uso.

ADVERTENCIA: Número máximo de ciclos de lavados 25

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES.

REF. 182/REF.183/REF.192/REF.193

3. LAVADO Y SECADO DE LA MASCARILLA



Número máximo de lavados 25 ciclos.


Para el lavado y secado de la mascarilla se recomienda seguir las siguientes instrucciones.



1. Lavado a máquina. Temperatura 60°C / 90°C.
2. El tejido admite el uso de lejía o otros productos blanqueadores.
3. La mascarilla no admite secado a máquina.
4. Temperatura máxima de planchado 150°C.
5. Los tejidos no admiten lavado en seco.

4. INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
2. Identificar la parte superior de la mascarilla.
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.
4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.
5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.
8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto, es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón, o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

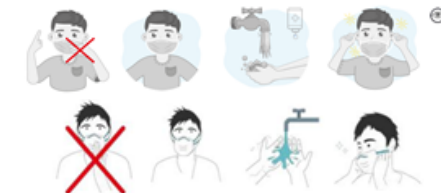

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES.

REF. 182/REF.183/REF.192/REF.193

5. RETIRADA DE LA MASCARILLA

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Si corresponde, quítese los guantes protectores.

2. Lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.

4. Para desechar la mascarilla se debe de colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico como se describe en el apartado 5 del presente manual.

5. Para reutilizar la mascarilla consérvela en un recipiente específico (bolsa de plástico limpia).

6. Volver a lavarse las manos con agua y jabón, o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

7. Limpie el exterior del recipiente con un producto específico de limpieza.



6. ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, ver figura a continuación). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior.



Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES.

REF. 182/REF.183/REF.192/REF.193

7. DURACIÓN DE USO MÁXIMO RECOMENDADO

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 h. en caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.


Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla sólo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo con estas instrucciones el apartado 5.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara.

No se debe de usar la mascarilla si está sucia o húmeda.

En el caso de almacenar temporalmente la mascarilla, se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después del uso.

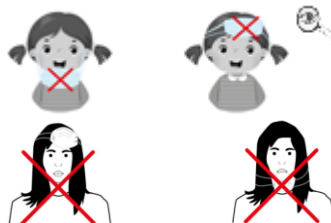

8. USOS NO RECOMENDADOS

La siguiente lista recoge una lista de ejemplo de usos de las mascarillas que deben evitarse.

1. Las mascarillas higiénicas no pueden usarse para protección contra productos químicos.
2. No es posible descontaminar las mascarillas mediante la congelación. El agente viral o bacteriano se conserva y a 4°C no pierde su carácter infeccioso.
3. No se debe de hervir las mascarillas para desinfectarlas. Los tejidos se deteriorarán y perderán sus propiedades.
4. No se debe de incumplir las medidas de distanciamiento social en la medida de lo posible, aun llevando la mascarilla.
5. No es necesario desinfectar las mascarillas antes de usarla siempre que se siga las instrucciones de uso.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES.

REF. 182/REF.183/REF.192/REF.193

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

El abajo firmante, en representación de la empresa:



JOYLU SPORT, S.L.

P.I. Las Quemadas; C/ Imprenta La Alborada, 119F; 14014 Córdoba.

☎ (+34) 957 32 45 42

✉ joylu@joylu.com

Declara que el diseño y fabricación del producto/
Declares that the design and construction of the product/
Déclare que le dessin et construction du produit:

TIPO DE PRODUCTO: MASCARILLAS HIGIÉNICAS REUTILIZABLES
MARCA: JOYLU
MODELO: Ref. 182
AÑO DE FABRICACIÓN: 2021

Es conforme a las disposiciones de las DIRECTIVAS EUROPEAS/
Complies with the regulation of the EUROPEAN DIRECTIVES/
Il est conformément aux dispositions des DIRECTIVES EUROPÉENNES:

2001/95/CE – Seguridad General de Producto

Normas de referencia / Standars of reference / Normes de référence:

**UNE 0065:2020
CWA 17553:2020**

Informe de ensayo / Test report / Rapport d'essai
Fecha de expedición de esta declaración de conformidad:

**AQUIMISA 21_036623
09/02/2021**

FIRMA (Nombre y cargo del firmante)